

たい よう

# 耐用期間の3年を過ぎると使用できなくなります

グロウジェクター®Lの耐用期間は使用開始(初回投与量設定)から3年間です。残りの期間の3カ月前から「お知らせ表示」が表示されます。

3カ月前



耐用期間(使用開始から3年間)の残りが3カ月以下

いつも通り注射はできるけど、電源を入れるたびに表示がでるよ。



1カ月前



耐用期間(使用開始から3年間)の残りが1カ月以下

いつも通り注射はできるけど、電源を入れるたびに警告音が鳴って表示がでるよ。



過ぎました



耐用期間(使用開始から3年間)が終了

電源は入るけど、注射ができないよ。



「お知らせ表示」が出たら…

新しいグロウジェクター®Lに交換いただくよう  
かかりつけの医療機関へご連絡をお願いいたします。



かく にん  
ご確認ください

新しいグロウジェクター<sup>®</sup>Lを処方された時は、  
医療機関での **初回設定** と **投与量の設定** が必要です。

み せってい  
未設定の場合は、ご使用いただけません。



いりょう せんよう  
※リモコンは医療機関専用です



いりょう  
必ず医療機関で  
せってい  
設定して  
もらってね!