

# グロウジェクターLをお使いの方へ

新しい薬に交換する時期は、  
ディスプレイに交換の操作が表示されます。  
表示に従って操作してください。

グロウジェクターLは、薬を無駄なく使い切るよう投与量を自動調整します。  
そのため、新しい薬を使い始めてから  
使い終わるまでの表示回数が変わることがあります。  
新しい薬への交換は、必ず**表示を確認してから**行ってください。



## 表示確認ポイント①

### 薬を最後まで使い終わったら...


1本分の最後の注射が終わると、「注射が終わりました」の後に「薬がなくなりました」と表示された後、自動的にピストンのリセットが始まります。



## 表示確認ポイント②

### 薬の使用期限が過ぎました

「薬の使用期限が過ぎました」と表示された後、「薬を交換しましょう」に切り替わります。  
☐ を押すと自動的にピストンのリセットが始まります。

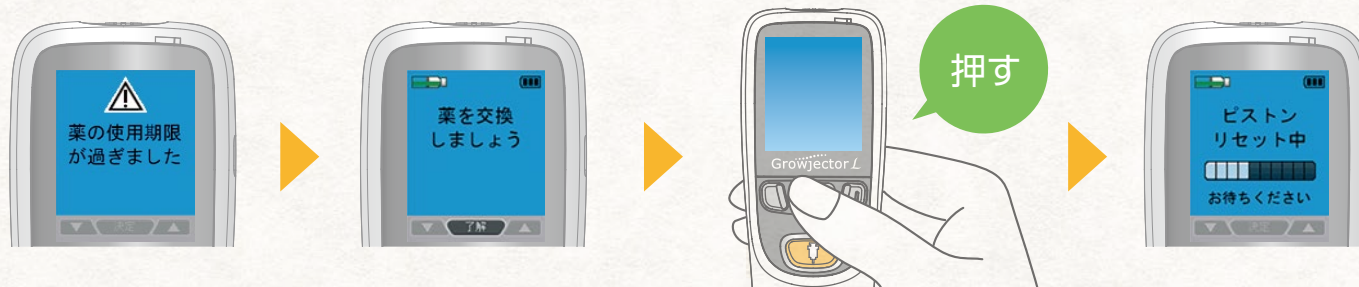

新しい薬への、交換時期はディスプレイに表示されるよ。  
それまでは、薬は先端ユニットから取外さずに使ってね!

